

Útmutató Tracoe® kanültisztító por (932) használatához

A Tracoe® kanültisztító por nagy hatékonysággal tisztító anyag, amit tesztelt a Tracoe® medical GmbH a Tracoe kanülökhöz a stoma buttonokhoz.

Alkalmazás:

Először tegyen egy mérőkanálnyi tisztító port (kb. 5g) a tisztító dobozba (REF 934) és töltsen fel 500 ml langyos vízzel. Válassza szét a külső és a belső kanült, aztán tegye bele a szűrőkosárba egymás mellé, és merítse bele a tisztító folyadékba. Vegye ki a kanüloket a szűrőbetéttel együtt a folyadékból 10 – max. 15 perc múlva, és öblítse le alaposan folyó vízzel.

Ha marad lerakódás a kanülben, tisztító pálcikával (REF 935 vagy REF 936) vagy tisztító kefével gyengéden távolítsa el. Öblítés után szárítsa meg, esetleg a külső részét puha pamut anyaggal törölje meg. A kanült csak száraz állapotban, a belső kanül beolajozása után illessze össze. A paraffin olaj megelőzi a külső és belső kanül összetapadását.

Ha pótlólagos fertőtlenítésre van szükség, a fertőtlenítő szerek listáját megtalálhatja a Tracoe Medical GmbH honlapján.

FIGYELEM!

Mindig oldja fel a port a vízben használat előtt; ne lélegezze be és kerülje el az érintkezést a szemmel és a nyálkahártyával! Ne nyelje le a tisztító port és tartsa távol a gyerekektől!

Mielőtt behelyezi a tiszta kanült a tracheostomába, mindig vizsgálja meg, hogy sértetlen az állapota, nincs éles vágás rajta, stb.. A ballonos kanült behelyezés előtt vizsgálja meg, nem szivároog-e.

Összetevők: foszfatok, emulziós anyag, tensidek, segédanyagok.

Nem mérgező. Nem tartalmaz maró lúgot és klórt.

Eltarthatóság: lásd a dobozon lévő címkét.

Kiszerezés: 1 doboz = 400 gr.